


SCHEMA elettrodi - CARDIOLINE Nuovo CLICK Holter 7 fili

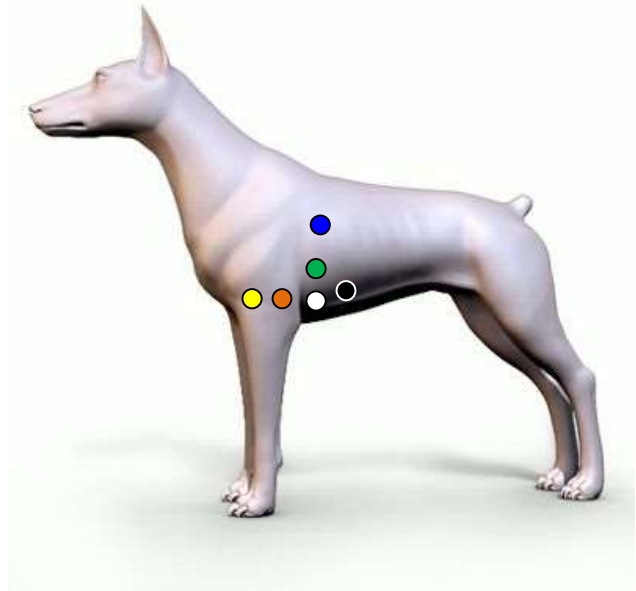

SX

Blu: VI spazio intercostale a livello di 7° vertebra toracica.


Verde: V-VI spazio intercostale a livello di base cardiaca sinistra.

Nero: cartilagine xifoidea.

Bianco: VI-VII spazio intercostale a livello di giunzione sterno-costale.

Arancio: IV-V spazio intercostale, sotto l'ascella sinistra.

Giallo: manubrio dello sterno.

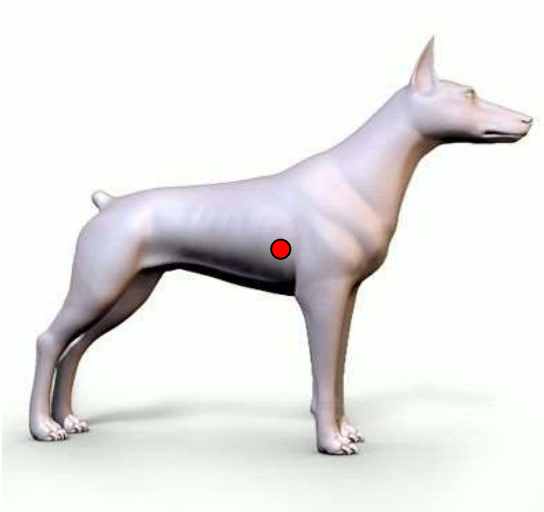

DX

Rosso: V-VI spazio intercostale a livello di base cardiaca destra.

CH1 (asse x) → VERDE + / ROSSO -
CH2 (asse Y) → BIANCO + / GIALLO -
CH3 (asse Z) → ARANCIO + / BLU -
NEUTRO → NERO