


POSIZIONAMENTO ELETTRODI M5 VET HOLTER

Riferimento	DESTRA	Riferimento	SINISTRA
Base cardiaca, vicino al gomito dx	ROSSO ● Negativo	Base cardiaca, vicino al gomito sx	GIALLO ●
			Giunzione costo- condrale
Giunzione costo- condrale	NERO ●	Apice, vicino allo sterno	ROSSO ● CH1

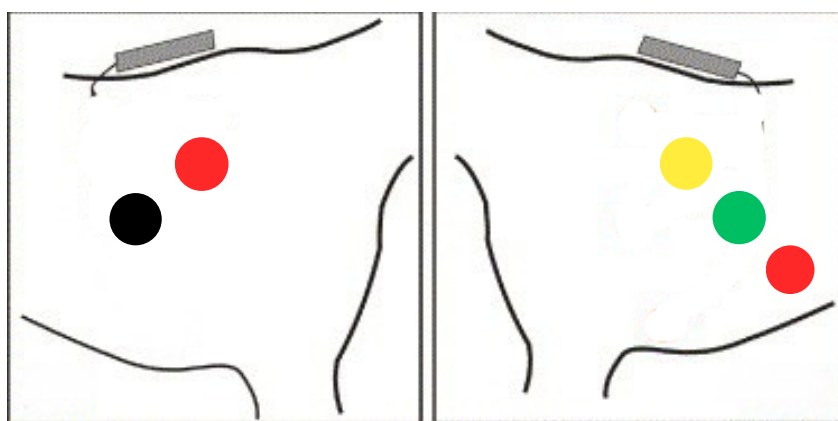

Destra

Sinistra

Per una corretta registrazione è fondamentale che tutti gli elettrodi (con particolare attenzione a quello nero, siano saldamente attaccati al paziente. Per preparare il paziente al meglio, rasare la zona di applicazione, sgrassare con alcool e lasciar asciugare bene.